



# BD Nexiva™


Cateter IV com sistema  
fechado de infusão  
Dupla Via

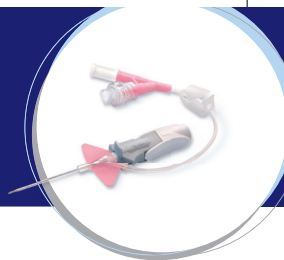


## PONTOS PARA PRATICAR

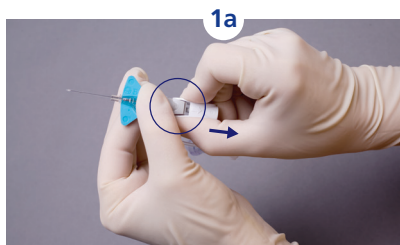


1a

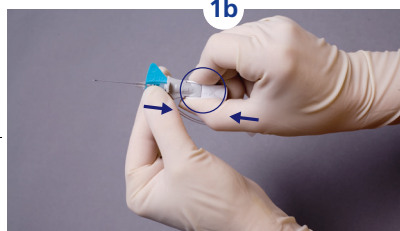

1b

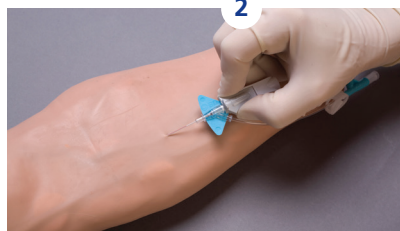

2

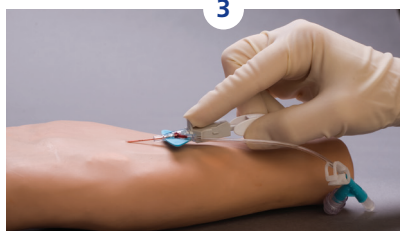

3

### PREPARO:

- Verifique o filtro de ventilação e o conector BD Q-Syte™.
- O clamp deve estar aberto.
- Retire a capa protetora da agulha.
- Segure no apoio dos dedos, conforme a figura e puxe aproximadamente 0,5 cm.

- Empurre o apoio dos dedos de volta à sua posição original, de modo que a plataforma de estabilização e apoio dos dedos estejam encaixados.


### INSERÇÃO E REFLUXO:

- Segure o cateter conforme indicado na figura e puncione o vaso.
- O refluxo será visualizado primeiramente na cânula e, a seguir, no extensor dupla via.
- Reduza a angulação e avance o conjunto (cânula e agulha) de forma a garantir que a ponta da cânula esteja dentro do vaso.

### PROGRESSÃO:

- Usando a "aleta" com o dedo indicador progrida a cânula para dentro do vaso.


**DICA:** Cuidado para não retrair/puxar a agulha durante a progressão.

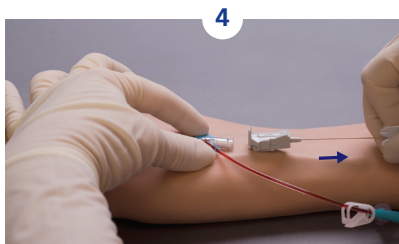

#### REMOÇÃO DA AGULHA:


- Estabilize o conjunto e puxe a agulha utilizando o apoio dos dedos até que haja a desconexão.
- Descarte a agulha protegida em um coletor específico para perfurocortantes.

**DICA:** Não segure na "aleta" durante a retirada da agulha pois o sistema de segurança não será acionado.

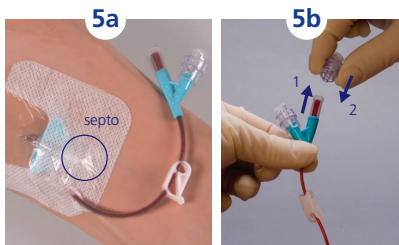

#### ESTABILIZAÇÃO E PREPARO DE USO:

- Aplique curativo transparente cobrindo o septo de contenção de sangue, permitindo o uso máximo do extensor dupla via.
- Feche o clamp.
- Remova o filtro de ventilação e conecte o BD Q-Syte™ adicional.

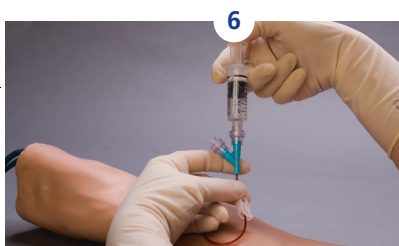

#### ACESSO E LAVAGEM:

- Desinfete o dispositivo BD Q-Syte™ com um antisséptico apropriado.
- Insira o bico da seringa ou equipo (Luer Lok™ ou Slip Lok™) de forma reta.
- Abra o clamp, lave e/ou inicie a infusão.
- Fixe o extensor.

**DICA:** Lúmen único em infusões concomitantes, use drogas compatíveis.



#### DESCONEXÃO:

- Feche o clamp antes de desconectar para minimizar o refluxo de sangue.
- Segure o BD Q-Syte™ durante a desconexão e desconecte em movimento reto.



BD, Logotipo BD e todas as outras marcas são de propriedade da Becton, Dickinson and Company.  
© 2012 BD

Registro ANVISA 10033430637